


Juosmens diržas

Nuoroda: FC150024-S/M/L/XL

- Lengvai pritaikomas pacientui.
- Puikiai prilaiiko kūną dėl reguliuojamo juosmens diržo.
- Dirželio reguliavimo sagtelės.
- Rekomenduojamas greitiems persodinimams iš sėdimos padėties į sėdimą padėtį.
- Neslystančios medžiagos sąlytis su paciento kūnu.
- Vienas dirželis skirtas tik vienam asmeniui ar pacientui.
- **Keturi dydžiai:** S / M / L / XL

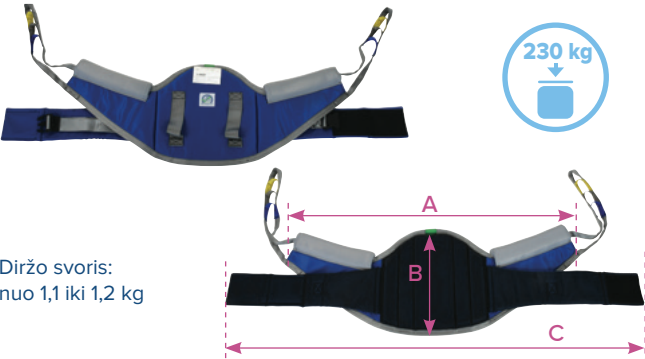

Diržo svoris:
nuo 1,1 iki 1,2 kg

Dydis	S	M	L	XL
A	800 mm	920 mm	1010 mm	1120 mm
B	330 mm	350 mm	390 mm	450 mm
C	990 mm	1170 mm	1390 mm	1570 mm




Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr

Tualetto diržas

SU GALVOS ATRAMA

Nuoroda: FC220271-S/M/L/XL

- Gali būti naudojamas asmens higienai bei tualetto reikmėms.
- Platus kūno diržas, sutvirtinta nugaros dalis, šoniniai prailginimo dirželiai ir žema klubų sritis.
- Rekomenduojamas persodinimams į vonią, dušą ar baseiną, transfers.
- Galinis dirželio laikiklis padeda reguliuoti padėtį.
- 4 padėties kilpos paciento padėties pritaikymui.
- **Galvos atrama** – optimaliam naudotojo prilaikymui.
- **Keturi dydžiai:** S / M / L / XL

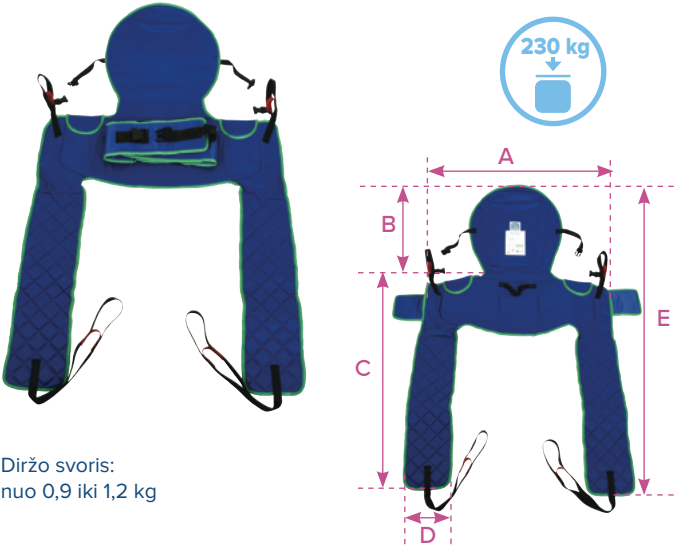

Diržo svoris:
nuo 0,9 iki 1,2 kg

Dydis	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	440 mm	500 mm	580 mm	640 mm
C	870 mm	950 mm	1020 mm	1100 mm
D	148 mm	168 mm	186 mm	204 mm
E	1310 mm	1450 mm	1600 mm	1740 mm

Tualetto diržas

BE GALVOS ATRAMOS

Nuoroda: FC220270-S/M/L/XL

- Gali būti naudojamas asmens higienai bei tualetto reikmėms.
- Platus kūno diržas, sutvirtinta nugaros dalis, šoniniai prailginimo dirželiai ir žema klubų sritis.
- Rekomenduojamas persodinimams į vonią, dušą ar baseiną, transfers.
- Galinis dirželio laikiklis padeda reguliuoti padėtį.
- 4 padėties kilpos paciento padėties pritaikymui.
- **Keturi dydžiai:** S / M / L / XL



Diržo svoris:
nuo 0,9 iki 1,2 kg

Dydis	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	840 mm	910 mm	1020 mm	1050 mm
C	290 mm	317 mm	340 mm	367 mm
D	148 mm	168 mm	186 mm	204 mm



Nuotraukos yra informacinio pobūdžio, gali keistis tam tikros sudedamosios dalys dėl gamybos ar tobulinimo poreikių. Nemeskite viešose vietose.

Kaip pasirinkti tinkamą diržą

Esminiai Drive DeVilbiss diržų privalumai - paciento komfortas ir patogus naudojimas. Kruopščiai apgalvotas asortimentas siūlo universalius naudojimo sprendimus. Norint parinkti tinkamą diržą, visos paciento priežiūros situacijos turi būti vertinamos individualiai.

Pasirinkus diržo modelį, kitas žingsnis – nustatyti tinkamą diržo dydį, atsižvelgiant į paciento ūgį bei, papildomai, į krūtinės ar liemens apimtį, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje:

Apimtis	Ūgis	Diržai	Spalva
68 - 91 cm	129 - 150 cm	S (mažas)	Raudona
79 - 104 cm	147 - 168 cm	M (vidutinis)	Geltona
102 - 129 cm	165 - 178 cm	L (didelis)	Žalia
124 - 150 cm	170 - 183 cm	XL (labai didelis)	Mėlyna

Kaip išmatuoti?

Apimtis


Vyrams – matuojama krūtinės apimtis (po rankomis).
Moterims – matuojama liemens apimtis.

Dydis

Geriausia dydį nustatyti, kai pacientas guli.

Išmatavimas:

Nuo kaklo iki kryžkaulio, nuo kryžkaulio iki pakinklio duobės ir nuo pakinklio duobės iki kulno. Nustačius paciento apimtį ir ūgį, galima pasinaudoti lentele tinkamam diržui parinkti.

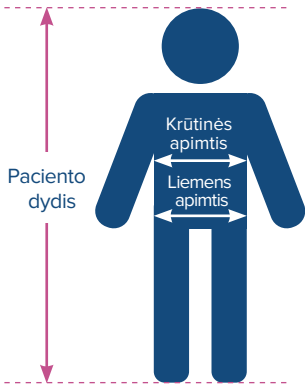

Šis vadovas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir skirtas padėti pasirinkti tinkamą diržo dydį. (Išsamų įvertinimą ir rizikos analizę turi atlikti kvalifikuotas specialistas)

Universalus diržas

SU GALVOS ATRAMA

Nuoroda: FC170074-S/M/L/XL

- Patogiams perkėlimams.
- **U formos** konstrukcija lengvam priėjimui ir paciento padėties nustatymui.
- Paminkštinta kojų atrama didesniai patogumui perkėlimo metu.
- Skirtas perkėlimui iš lovos į kėdę ar iš kėdės į lovą ir kėlimui nuo grindų.
-
- **4 padėties kilpos** paciento padėties pritaikymui.
- **Galvos atrama** – optimaliam naudotojo prilaikymui.
- **Keturi dydžiai** : S / M / L / XL



Dydis	S	M	L	XL
A	760 mm	890 mm	1030 mm	1160 mm
B	525 mm	585 mm	645 mm	710 mm
C	470 mm	550 mm	630 mm	710 mm
D	995 mm	1135 mm	1275 mm	1320 mm
E	1320 mm	1410 mm	1560 mm	1740 mm
F	150 mm	200 mm	255 mm	305 mm

Viso kūno diržas

SU GALVOS ATRAMA

Nuoroda: FC220267-S/M/L/XL

- Patogiams perkėlimams.
- **U formos** konstrukcija lengvam priėjimui ir paciento padėties nustatymui.
- Paminkštinta kojų atrama didesniai patogumui perkėlimo metu.
- Skirtas perkėlimui iš lovos į kėdę ar iš kėdės į lovą ir kėlimui nuo grindų.
- Galinis dirželio laikiklis padeda reguliuoti padėtį.
- **4 padėties kilpos** paciento padėties pritaikymui.
- **Galvos atrama** – optimaliam naudotojo prilaikymui.
- **Keturi dydžiai** : S / M / L / XL




Dydis	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
C	1190 mm	1260 mm	1330 mm	1450 mm
D	910 mm	980 mm	1050 mm	1170 mm
E	126 mm	136 mm	146 mm	163 mm

Viso kūno diržas

BE GALVOS ATRAMOS

Nuoroda: FC220266-S/M/L/XL

- Patogiams perkėlimams.
- **U formos** konstrukcija lengvam priėjimui ir paciento padėties nustatymui.
- Paminkštinta kojų atrama didesniai patogumui perkėlimo metu.
- Skirtas perkėlimui iš lovos į kėdę ar iš kėdės į lovą ir kėlimui nuo grindų.
- Galinis dirželio laikiklis padeda reguliuoti padėtį.
- **4 padėties kilpos** paciento padėties pritaikymui.
- **Keturi dydžiai** : S / M / L / XL

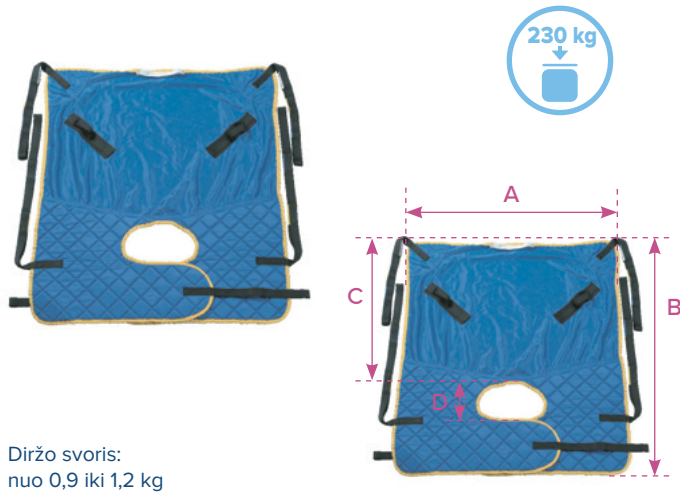

Dydis	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	910 mm	980 mm	1050 mm	1170 mm
C	607 mm	653 mm	700 mm	780 mm
D	126 mm	136 mm	146 mm	163 mm